



Instrucciones para utilizar la Medición Automática de Temperatura Corporal.



Led Verde
(32-37.3 °C)
normal.



Led Azul
(37.3-38 °C)
fiebre baja.



Led Rojo
(>38 °C)
fiebre alta.



1 Inserte su cédula en la bandeja inferior del dispositivo.



2 Espere la lectura de la cédula durante 5 segundos.



3 Despeje la muñeca de mangas u objetos que la cubran y acérquela lentamente a una distancia de 5 a 3 cms.
"Visualización de temperatura y activación de alarma luminosa, indicando su estado".



4 Verificar en pantalla el número de su cédula.



5 Retire su cédula de la bandeja (el equipo automáticamente procesará los datos recogidos y mostrará en su pantalla el mensaje "Bienvenido", si no tiene fiebre, en caso de que la persona tenga fiebre, el equipo activará una alarma audible y luminosa, finalizando con un "Acceso Denegado").

Recomendaciones de Uso y Seguridad

- No retirar la cedula antes de finalizar el proceso y siga los pasos, de lo contrario generara errores en el equipo.
- La lectura de cedula es única para la cedula de nacionalidad Colombiana, en caso de necesitar el registro de otro documento de identidad ponerse en contacto con el proveedor este le indicara si es posible.
- Este equipo solo debe ser utilizado de acuerdo a los propósitos.
- Si la medición de temperatura se hace en una parte con ropa o objetos la lectura será errónea.
- Este equipo siempre se debe mantener en un área limpia y seca.
- No exponga el termómetro a descargas eléctricas.
- No use este dispositivo dentro de una humedad relativa mayor a 85%.
- Evite dejar caer el equipo.
- Si se presenta algún problema con el equipo, póngase en contacto con su proveedor. No intente repararlo usted mismo.



Fabricado por:



www.csic.com.co

Calle 15 sur No. 17-44 of. 306
PBX: 361884
Bogotá